

# コレクトプラスについて

## 1. ディスペンサーガンについて

コレクトプラスシリーズ(パテを除く)はタイプ2のディスペンサーガン(50mLカートリッジ用)が必要となります。旧タイプ(タイプ1)はカートリッジを装着することができませんことご了承ください。



## 2. カートリッジの取扱いについて

ミキシングチップ内でシリコンが硬化した状態で無理にディスペンサーガン进行操作しないでください。ディスペンサーガンを無理に操作するとカートリッジ及びディスペンサーガンの破損やペーストの逆流を生じることがあります。



## 3. ペーストの等量排出確認について

ミキシングチップを装着する前に練和紙等に少量ペーストを排出し、両ペースト(ベース、キャタリスト)が等量排出されていることを必ずご確認ください。ペーストが等量排出されていない場合、硬化不良を生じる恐れがありますので、ご使用毎に必ずご確認ください。



## 4. 石膏の注入について

印象採得後、応力ひずみの開放と石膏との反応を避けるため、最低 1 時間以上放置してください。印象採得直後に石膏を注入すると、印象精度の低下及び印象から放出されるガスにより石膏面が粗造になりますのでご注意ください。