

プロビジョナルクラウンの リマージンやウォッシュに適した 即時重合レジン



写真提供：原宿デンタルオフィス 山崎 長郎 先生



Estheline Jet Tooth Shade エステファイン Jet Tooth Shade

圧接時の細部再現性に優れ、プロビジョナルクラウンのウォッシュや、リマージンに適した即時重合レジンです。

リマージン時の操作方法 (混和法)

※ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。



プロビジョナルクラウンのマージン部や内面に、混和した本材をインストゥルメント等で、適量築盛します。



微弱なエアーなどで、本材の餅状化のタイミングを確認します。



支台歯および周囲にレジン分離材を薄く塗布し、支台歯へ、浮き上がりが無いように圧接します。



本材が完全に硬化する前に1~2回程度、着脱をくりかえします。(注)



硬化後、通法に従い、形態修正・研磨、清掃をおこないます。

(注) 本材は、重合する過程で発熱を伴うため、温度の上昇を感じたら火傷等を防ぐため、速やかに口腔外に取り外してください。

シェード



※印刷のため、色調は実物とは異なります。

エステファイン Jet Tooth Shade

パウダー

□ 100g ボトル ----- ¥3,500

シェード 60/A1 62/A2

リキッド

□ 118mL ボトル ----- ¥3,200

□ 236mL ボトル ----- ¥4,000

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。 本価格は2015年4月1日現在の標準価格です。(消費税を含みません。)

製造元：ラングデンタル社(アメリカ合衆国) (Lang Dental Manufacturing Co., Inc.) 管理医療機器 歯科材料 3 義歯床材料 歯科汎用アクリル系レジン (70916010) 認証番号: 226AFBZX00007000 号

Estheline Jet Set-4

FAST LIQUID


即時重合レジン エステファイン Jet Set-4 ファスト リキッド

優れた耐久性、豊富なカラーバリエーション、コストパフォーマンスで、
ご好評をいただいている即時重合レジン「エステファイン Jet Set-4」に、
硬化時間を短縮できる「ファスト リキッド」が登場



硬化時間を約1分短縮

エステファイン Jet Set-4 の硬化時間を約1分短縮

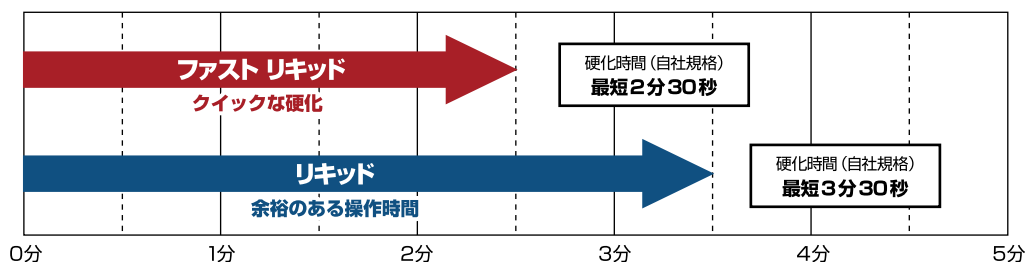

エステファイン Jet Set-4 は豊富なカラーバリエーションを持つ即時重合レジンです。

審美性を追求するためにカラーブレンドされたエステティックカラー（4色）と、Vita シェードにマッチした基本色（6色）、特殊色（2色）の全12色を取り揃えており、美しいプロビジョナルクラウンの製作が可能です。

エステティックカラー

歯冠色

※印刷のため、色調は実物とは異なります。



コストパフォーマンスを重視

優れた操作性と美しい色調を持ちながら、コストパフォーマンスを重視。



パウダー 標準価格(税別)

- 45gボトル ¥2,800
- 100gボトル ¥3,500
- 250gボトル ¥6,500
- 454gボトル ¥9,400



リキッド 標準価格(税別)

- 118mL ボトル ¥3,200
- 236mL ボトル ¥4,000
- ファスト リキッド**
- 118mL ボトル ¥3,200
- 236mL ボトル ¥4,000

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。 本価格は2015年4月1日現在の標準価格です。(消費税を含みません。)

製造元：ラングデンタル社(アメリカ合衆国) (Lang Dental Manufacturing Co., Inc.) 管理医療機器 歯科材料3 義歯床材料 歯科汎用アクリル系レジン(70916010) 認証番号:226AFBZX00006000号

PENTRON®
JAPAN INC.

製造販売元：ペンترون ジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井4-13-17 レ・ジュ大井町5F・6F
TEL.03-5746-0316 FAX.03-5746-0320